



La primera lente verdaderamente multifocal del mundo

US-11126012-B1 and US-11287673-B1

Lente de Acomodación Natural - NAL[®]



*Vuelve
a disfrutar
de una
visión clara
y juvenil[™]*



Lente de Acomodación Natural - NAL[®]


Primer concepto de **un verdadero** lente multifocal: Lente de Acomodación Natural - NAL[®]

El 21 de septiembre de 2021, la USPTO emitió la Patente de EE.UU. Número: US 11,126,012 B1 para Broadview Natural Addition Lens.

El 29 de marzo de 2022, la USPTO otorgó una segunda patente, la Patente de EE.UU. Número: US 11,287,673 B2.

NAL[®] y OmniLux[®] son marcas registradas de la USPTO de Michael Walach.

NO REQUIERE PERIODO DE ADAPTACIÓN Y TIENE CASI CERO RECHAZOS.

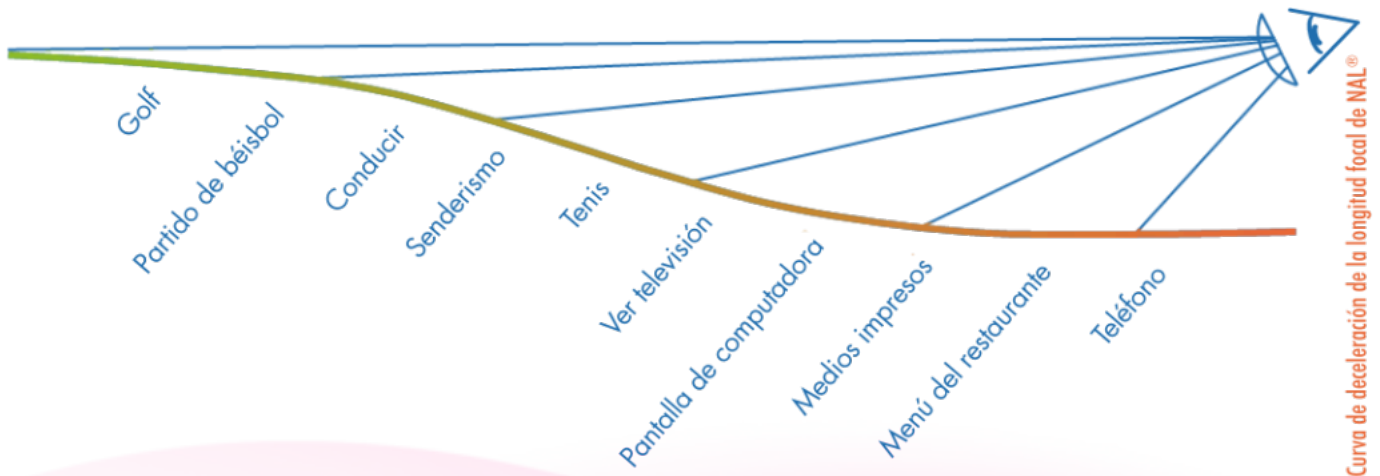

La NAL[®] no tiene el corto e incómodo tunel de visión intermedia inherente a las lentes progresivas.

NAL[®] tiene un campo visual en forma de embudo compuesto por bandas de poder lateral sustancialmente esféricas, que están alineadas a lo largo del eje de diseño vertical.

La estructura del diseño consiste en una curvatura definida matemáticamente, basada en la de desaceleración de la longitud focal de la mirada natural hacia abajo; utilizando nuestro modelo ergonómico único de interacción entre el ojo y la lente, y se fundamenta en exhaustivos datos de ajuste.

Michael Walach, el Inventor

Presidente de Quest Vision Care Specialty Lab
y CEO de QLDS, Inc.



SUPERIORIDAD DEL CONCEPTO NAL[®]

Lente
de adición progresiva
digital
moderna

NAL[®]



Los campos visuales son en forma de embudo en lugar de forma de reloj de arena, con campos visuales suavemente conectados que proporcionan una visión natural en **todas las distancias**, desde lejos hasta cerca

AVISO

Hay distorsiones onduladas en la lente de adición progresiva que se eliminan completamente en NAL[®]

Esto es un cambio radical para la mayoría de los usuarios que no se adaptan a lentes de adición progresiva. También hace posible convertir a pacientes con lentes bi- y tri-focales a lentes multifocales por primera vez en la historia.

Lente de Acomodación Natural - NAL[®]

HAZ CRECER TU NEGOCIO CON ESTA OFERTA ÚNICA.

AQUI TE EXPLICAMOS COMO

Lente de Acomodación Natural - NAL[®] aporta:
Un lente que los gigantes de la industria no pueden ofrecer, así obtienes tú la ventaja competitiva.

Escala tu negocio con una mayor retención de pacientes.

Potencia tu negocio mediante recomendaciones personales de pacientes.

Haz más felices a tus pacientes de lentes bi- y tri-focales convirtiéndolos en usuarios de verdaderos lentes multifocales.

Recuerda: La Lente de Acomodación Natural - NAL[®] es un producto de primera calidad y debe ofrecerse con un PVP de primera calidad.

*Vuelve
a disfrutar
de una
visión clara
y juvenil[™]*





Existen dos tipos de lentes OmniLux® NAL®

LA ÚNICA DIFERENCIA ESTÁ EN CÓMO SE COLOCA EL DISEÑO EN ELLENTE




La toma de altura no es necesaria
Pero se requieren datos
de trazado para que la IA calcule
la colocación del diseño individual.



La toma de altura es necesaria
Y no se necesitan datos
de trazado ya que la IA no interviene
en la colocación del diseño individual

MONTAJE

- La medida mínima recomendada de la montura, "B", es de 32mm o una altura de montaje mínima de 19mm para Custom
- Mide la DP monocular - justo como en los lentes monofocales, necesario para la descentración horizontal
- Para un rendimiento visual óptimo, la inclinación pantoscópica recomendada es de 10-12 grados

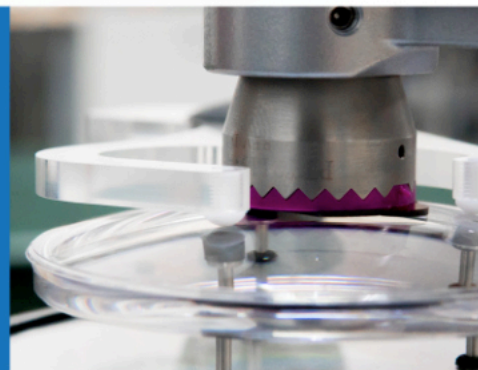

ACABADO & INSPECCIÓN

- El biselado de la lente es justo como en las lentes de visión única, con solo descentración horizontal para la DP.
- Las marcas de grabado láser están separadas 34mm y siempre se ubican en el centro vertical del montura.
- El punto de referencia de grabado (ERP siglas en inglés) está centrado entre las marcas de grabado y la ubicación para realizar la verificación de potencia.

La Lente de Acomodación Natural - NAL® es un producto fabricado en cualquier Laboratorio Digital de lentes free-form:

Está disponible en todos los materiales con todos los tratamientos



QLDS Inc.
9191 132nd Ave N,
Largo, FL 33773

qldsamerica.com
info@qldsamerica.com
[linkedin.com/company/qlds](https://www.linkedin.com/company/qlds)